

karma 康揚



醫療器材商名稱：

康揚股份有限公司

KARMA MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.

醫療器材商地址：

嘉義縣民雄鄉豐收村大學路二段 2363 號

E-mail:service@karma.com.tw

Tel:05-206 6688 / Fax:05-206 6699

www.karma.com.tw

製造業者名稱：

COMBO (ZHONGSHAN) MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.

製造業者地址：

NO.6 TONGXING EAST ROAD, DONGSHENG TOWN,
ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE CHINA 528414

許可證字號：衛部醫器陸輸壹字第 003910 號

karma 康揚

型號：輕鬆行 100 (EZ Walker 100)

使用說明書



符合新補助辦法: 個人行動輔具第三一項帶輪型助步車 (助行椅)

衛部醫器陸輸壹字第 003910 號

醫療器材名稱："康揚"機械式助行器(未滅菌)



karma 康揚

組裝說明

請仔細閱讀本說明後，再使用產品，避免安全事故或是對產品的損害。

1. 從包裝箱及包裝塑膠袋內取出產品。
2. 打開車架，將車架側支撐往下壓到底。
4. 取下背靠將背靠管左右插入背靠管承座內，確認彈扣彈出確實卡好。
5. 取出左右推手，將推手高度調整螺絲拆下，將推手叉到車架上，鎖回推手高度調整螺做固定。(可以依人體高度調整合適推手高)
6. 旋轉車架高度調整螺絲，依使用者身高調整至合適坐立高度後鎖固。



安全注意事項

1. 使用前須確認助行車已經完全打開，推手固定螺絲鎖附固定良好，背靠確實插入塑料托架且彈扣彈出確實卡好。
2. 左右推手需要調整為高度一致。
3. 乘坐前，須確認助行車處於平穩及刹車的狀態，以避免助行椅傾倒。
4. 乘坐時，他人切勿推行，本助行車不能當為推行的輪椅使用。
5. 助行車必須先四輪著地，使用者須雙手緊握兩側握把，再往前逐步行走，不可將助行車用單邊著地行走，如此會產生使用者重心不穩。
6. 請依道路交通法規行人安全規範，使用行走於平整安全行人路線。
7. 調整握把高度後，可能影響助行車使用之穩定性。



刹車握把使用方式:

- 將刹車握把往上提，助行車會處於刹車減速狀態。
- 使用刹車，左右兩邊應保持力道均勻。
- 將刹車握把往下壓，刹車功能會處於鎖固駐車狀態。