

變形金剛

五大調整功能，包含 座深、座高、背墊角度、扶手高，以及後輪重心；微調出個人化適配，猶如量身訂製。

承襲 KM-8520 的堅固與耐用，除了通過顛坡路面 20 萬轉實車測試，變形金剛® 更以「強化雙連桿結構」，通過英國撞擊測試，成為市面上最安全可靠的輪椅之一。最高可補助新台幣九千元。

適用申請補助
輪椅 B 款
附加功能 A



通過英國交通撞擊測試



karma 康揚

好的輪椅，好在適配！

康揚股份有限公司
台灣·嘉義縣民雄鄉大學路二段2363號
T 05-206 6688 F 05-206 6699
www.karma.com.tw



強化版 變形金剛 HD

剛性加倍、穩固升級，專為壯碩型的使用者設計。此外，承接變形金剛® 所有的調整性與配件，可依個別身型作調整，為使用者提供足夠的調整空間。最高可補助新台幣一萬四千元。

適用申請補助
輪椅 C 款
附加功能 A



獨特雙向推桿

增加車身穩定，提升安全性。

加寬後輪

胎寬增加 2.7%，增加穩定性



· 本公司保有修改型錄內產品之權利，恕不另作通知 · 104-40682 Rev.01 Sep.2014


karma 康揚 好的輪椅，好在適配！



變形金剛

逐步調整，邁向獨立

復健的過程總是充滿變化對輪椅的需求，也將持續變化一台能夠隨著復健進程同步的輪椅讓不同復健階段的生活，更簡單輕鬆

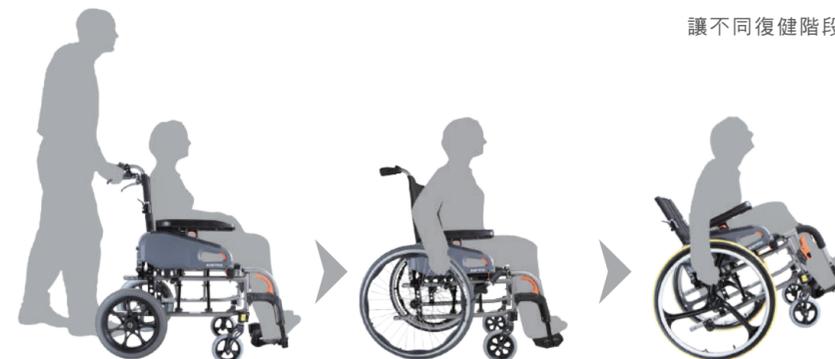

▶ 隨著復健進程調整

在復健初期，需要一台操作穩定的介護輪椅，增加乘坐的安全感；然而，當傷者在復健進程中，逐漸恢復肌力與耐力之後，靈活的高活動輪椅，才能協助病友重建自主生活。

變形金剛® 擁有20多項調整功能，隨著不同時期的身體機能，同時進化，替您省下不必要的更替浪費。

適配項目	變形金剛	變形金剛HD	
可調	背墊夾角	-4°-16°，每4°可調	-4°-16°，每4°可調
	背高	38-53cm	38-51cm
	座高	39-53cm	46-53cm
可選	座深	41-46cm，每2.5cm可選	41-51cm，每5cm可選
	前輪	5"/6"/7"/8"	6"/7"/8"
	後輪	14"/20"/22"/24"	14"/22"/24"
	座寬	38.5-51cm，每2.5cm可選	51-61cm，每5cm可選



調整式背墊

後掀升降扶手組

快拆後輪組

介護配置 ▶

- 14英寸小輪組，方便移位練習，且輪椅重量較輕，能減輕照護者的負擔。
- 背墊角度微調至106度，搭配51cm高背。



◀ 靈活配置

- 24英寸鎂合金輪組，輕巧好推。
- 背墊角度微調至90度，搭配43cm低背高，推行時更符合人體工學。



型號	前/後輪 F/R wheels											安全載重 Max. User Weight
KM-8522	5" - 8" 14", 20", 22", 24"	38 - 51	41-46	56 - 69	34	21-29	102 - 107	39-53	38-53	76-106	Min14.2 kg	130kg
KM-8522HD	6" - 8" 14", 22", 24"	51 - 61	41-51	71 - 81	35	21-29	108 - 118	46-53	38-51	84-104	Min16.5 kg	170kg

顏色尺寸依現貨為準 ±1cm ±0.5Kg

▶ 多元選購件



標配 人因扶手墊

剪裁俐落，推行時避開手臂與扶手墊的摩擦。



選購 帆船扶手墊

左右加寬，前後加長。



選購 包覆型扶手墊

內外0°-45°可調，適合手臂肌力微弱的使用者。



標配 雙向可旋撥腳



標配 中置式踏板



選購 單向微調踏板



選購 垂直撥腳

適用膝關節屈曲攣縮至90°或小腿長小於38cm的使用者。



選購 展軸升撥腳

升撥腳在上抬時，展軸會自動調整腳長，減除下肢擠壓腹部的壓迫感。



選購 截肢式撥腳

小腿板三向可調，完整支撐截肢部位。



選購 四向微調踏板

踏板前後、左右可調，搭配經緯雙向角度調整，提供踝關節角度受限的使用者，最完整的適配。

▶ 其他配件



硬式座背板



旋轉式反撐桿



專用拐杖架



輪椅安全掛鉤



輪椅專用置物網



多功能靠頭組



高低可調背墊管（無背折功能）



手扶圈花輪粒 適合抓握能力不足的使用者

- 背墊補強桿
- 氧氣筒架
- 點滴架
- 輪椅專用桌板

座高	後輪	14"	20"	22"	24"
5"	18"	16"-17"-18"	16"-17"-18"	-	-
6"	18"-19"	18"-19"	18"-19"	19"	-
7"	19"	19"	19"	19"	-
8"	20"	20"	20"	20"-21"	-

前後輪與座位高配置表

五種前輪、四種後輪尺寸，可隨心選購。

更多選購配件，請上官網下載「輪椅處方工具書」！

