

從心設計、以人為本的優質輔具

座寬16”、18”可選，依照身型選擇適合的尺寸；
後輪大小可選：大輪(20”)方便乘坐者自己推行，小輪(14”)則是減輕照護負擔、輕鬆移位。
可搭配個人化的量身製作服務，全方位適配需求。
座/背墊皆經過抗菌防霉處理，有效提高預防感染的效果，確實為乘坐者與家人的健康把關。

選購



NXT背靠
一體成型背墊管方便加裝其他擺位硬背靠、側支撐等擺位配件。



垂直式撥腳
適用膝關節屈曲攀縮至90°或小腿長小於38cm的使用者。



四向微調踏板
微調式踏板，前後左右可調，讓踏板不只是平面，可隨個人踝關節情況調整到最佳位置。



展軸升撥腳
展軸設計能讓靠腳提起時，讓腳部和緩伸展、膝關節得到放鬆。



包覆型扶手墊
內外0°~45°可調，適合手臂無力需要支撐的使用者。



專用拐杖架



點滴架



氧氣筒架

適用申請補助
輪椅-B款 | 輕量化量產型+輪椅附加功能A款 | 具利於移位功能、輪椅附加功能B款 | 具仰躺功能、輪椅附加功能C款 | 具空中傾倒功能、擺位系統D款 | 輪椅頭靠系統

座寬	前/後輪											安全載重
16"	6"x14"	40	41	64	38	21-27	105	46.5	49	95	24.5 kg	115 kg
18"	6"x14"	45	41	69	38	21-27	105	46.5	49	95	24.7 kg	115 kg
16"	6"x20"	40	41	68	42	21-27	105	46.5	49	95	24.8 kg	115 kg
18"	7"x20"	45	41	73	42	21-27	105	49	49	103	25 kg	115 kg
18"	7"x14"	45	46	69	38	21-27	110	49	54	103	25 kg	115 kg
18"	7"x20"	45	46	73	42	21-27	110	49	54	103	25.9kg	115 kg

*本公司保有修改型錄內產品之權利，恕不另作通知。111501000121 Rev.04 Sep.2020 顏色尺寸依現貨為準 ±1cm ±0.5kg |更多內容詳見官網|
衛部器廣字第10611017號 衛署醫器輸壹字第004939號 衛署醫器陸輸壹字第001563號

karma 康揚

康揚股份有限公司
621 嘉義縣民雄鄉大學路二段2363號
T 05- 206 6688 F 05- 206 6699
www.karma.com.tw

CE TÜV Rheinland ISO 13485



karma 康揚

好的輪椅，好在適配！



適合族群
坐不穩

仰樂多 2

空中傾倒 低潛滑仰躺紓壓


活動不再受約束，重新開啟豐富生活，
35°空中傾倒，30°低潛滑仰躺，
即使上半身控制力微弱，也能告別五花大綁。



舒

空中傾倒35° 安全重心潛移

總是心疼家人在輪椅上被反覆調整姿勢、拉扯身體嗎？透過空中傾倒，達到久坐不下滑的效果，讓照護者不用再費力，將滑落的乘坐者奮力拉起。空中傾倒時，更能讓臀部壓力轉換到背部，同時頸部能獲得伸展，讓虛弱的乘坐者也能外出走走，減少臥床的時間。

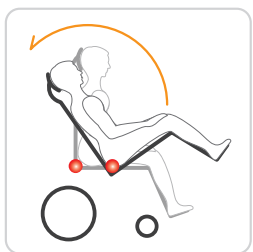

空中傾倒時，人體重心仍保持在前後輪之間，避免翻覆，安全更可靠。

● 為仰樂多2重心



無段式仰躺30° 低潛滑抗剪力

獨特的連桿作動設計，與人體同步仰躺，使乘坐者的身體不會因仰躺而向下滑動，不僅讓乘坐姿勢穩定，同時也避免身體因滑動造成的皮膚拉扯壓迫等身體傷害。

仰躺功能不僅滑動順暢無頓點感，也讓輪椅上的護理更輕鬆，移位更省力，讓照護者不會積勞成疾，不僅仰躺紓壓，照顧也輕鬆。

- 為人體骨盆旋轉點
- 為仰樂多2後躺連桿旋轉點



收

收納便於攜帶


誰說減壓放鬆，和外出攜帶，總是要二選一？仰樂多2一次滿足！不僅好收好搬，遊玩與就醫都方便。搭配橫向省力推把，加倍提高車體結構剛性、不因折疊收納設計影響強度，讓照護者方便施力、輕鬆推行、安全安心。

適

從頭到腳 個人化全適配

曲型頭靠

頭靠位置高度、左右、前後可任意調整，頭墊角度更能360°適配乘坐者的頭頸。免工具拆裝、工具可微調，搭配智慧插槽設計，高度定位不亂跑。

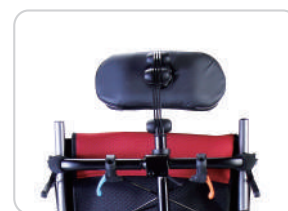

曲型頭靠

選購 調整式曲型頭靠

除了全方位角度高度調整之外，加寬式的頭墊，更能完整包覆頭部兩側，適配乘坐者的頭型，幫助頭頸較無力的乘坐者，有完善的頭部支撐。



調整式曲型頭靠

可調式背墊

依照背部所需支撐度而設計，能夠依照乘坐者身型，調整每一條黏帶，達到讓背部服貼且具有高度支撐性；強力魔鬼氈設計，方便可調兼具固定性，讓乘坐者上半身穩定又舒適。



升降扶手

上下高度工具可調、方便拆卸又直覺安裝，讓照護者方便將乘坐的家人移動到床、椅或車上。標配帆船扶手墊，加寬設計，提供手臂最舒服的擺放空間。也可依照個人手臂形狀，自由選購適合的扶手墊。

快拆式撥腳

快拆式撥腳內外雙向旋轉設計可依環境不同，將撥腳轉向或拆卸，增加移位便利性，挑戰狹窄空間位移機能。



挺立握把

總是彎腰駝背推著輪椅，長期下來除了會姿勢不良，還可能造成肩膀僵硬。挺立握把，讓你減少彎腰次數，用最自然的姿勢；最省力的方式推行。

