

零件手冊

樂弧 KM-9000




序言

感謝您採購康揚股份有限公司產品。康揚輔具一向以提供最高品質的產品及服務作為持續努力的目標，並藉由了解使用者需求及重覆測試產品，不斷累積經驗，進而提昇設計及製造品質，期望能呈現給您最安全適配之產品。

這本零件手冊適用於本手冊封面上的機種，當您要訂購零件時，請依車身骨架標貼S/N(產品序號)正確的引用部品物料。

範例:

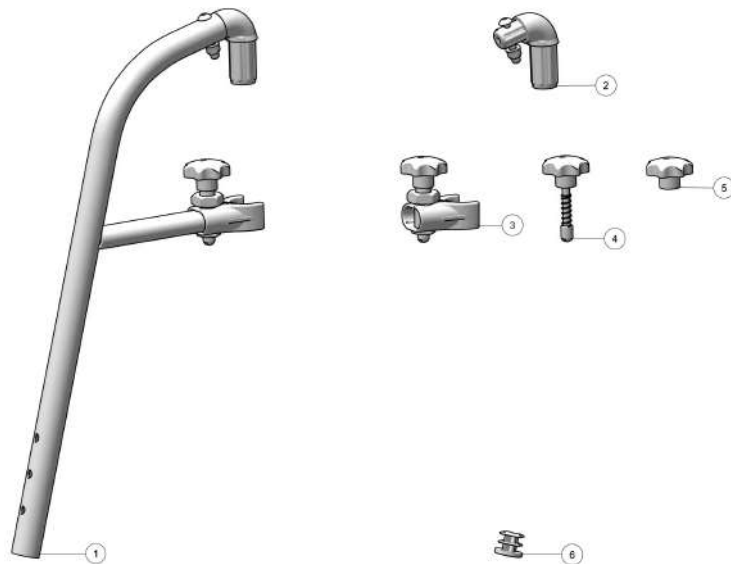

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
	1	150900000000	KM2512 撥腳組成 珍珠銀	1			PC	

欄位說明：

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
	1	150900000000	KM2512 撥腳組成 珍珠銀	1			PC	

類型：區分物料定價類型，符號N/A代表此物料不銷售，符號★代表建議常備物料

紀錄：終止接續料事項說明

備註：特別符號記事，符號說明：

× 停止銷售物料

○ 取代銷售物料

圖示說明：



該物件左右共用，僅鎖固方向有異。



該物件為布套標示，表示僅販售布套。

注意事項：

1. 訂購零件請註明：產品名稱 / 型號 / 產品序號 / 物料編號 / 物料說明。
2. 在本零件手冊發行後，若有修改、增訂或價格調整時，將會發佈零件手冊變更通報，請您必須及時依通報更正您的零件手冊版本，以保持準確度。
3. 請注意本零件手冊圖面僅用於購買部品物料編號，不用於維修組裝，若需要組裝資訊，請詳閱車型維修手冊。
4. 尼龍防鬆螺帽會隨拆解因素而失效，請注意原鎖固尼龍防鬆螺帽品質狀況，訂購更換。
5. 貨運運費：每次訂購需求價格未達1000元，另收貨運寄送運費150元。

零件免責聲明：

使用「康揚股份有限公司」原裝零件以外的任何零件都可能存在危險。公司對此類使用所造成的後果不承擔任何責任，否則將使產品保修無效。

版權宣告：

- (1)刊載的所有內容，包括文字、照片、影像、插圖、錄音片、影音片或其他任何形式之素材等，均受到中華民國著作權法及國際著作權法律的保障。
- (2)提供的內容與服務，使用人利用時必須遵守著作權法的所有相關規定，否則將構成著作權之侵害，而須依法負民事及刑事責任。
- (3)非經取得著作權人書面同意或授權，使用者不得變更、發行、播送、轉賣、重製、改作、散布、表演、展示...利用局部或全部的內容或服務，以賺取利益。
- (4)使用者下載或拷貝零件手冊內容或服務僅可供個人、非商業用途之使用。個人使用以外之其他用途，在未取得「康揚股份有限公司」或其他內容提供者著作人書面許可之前，完全禁止。
- (5)如有任何授權問題，請來信 email：marketing@karma.com.tw

法律責任：

這本手冊僅作參考之用，不作任何形式的保證。此文件主要目的在提供使用者購買本產品零件時所需的相關資訊，作為參考文件之用。使用者如沿用本手冊內容作其它方面的使用參考而導致任何權益，產品等等損害的話，本公司不負任何責任。同時為產品更新時之需要，我們將保留修改本手冊的權利，發佈部品通報。

※如有任何疑問請利用以下服務專線：

公司電話：05-2066688 分機213～219

傳真：05-2066699

客服專線：0800-522166

(服務時間：週一至週五08:30～17:30)

目錄

色彩說明	
色彩說明	1
座叉	
座叉	2
側架	
側架	4
推手管	
推手管	6
剎車	
駐車剎	8
後輪	
後輪 Q24x1"	9
輪座/軸襯	11
前輪	
前輪	12
座背墊	
座墊	14
背墊	15
扶手	
扶手	16
護板	17
踏板	
連動式踏板	18
一片式踏板	19
標準型踏板	20
外加配件	
骨盆帶	21
腿帶	22
反撐桿	23
拐杖盒	24
打氣筒	25
紙箱/使用手冊	
紙箱/使用手冊	26

色彩說明

色彩說明

骨架顏色



白



檸檬黃



黑鑽銀




座背墊顏色



三明治黑網

座叉

座叉

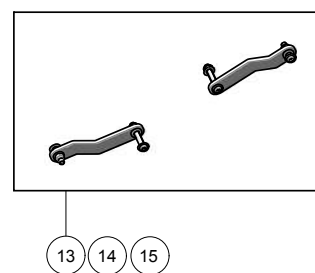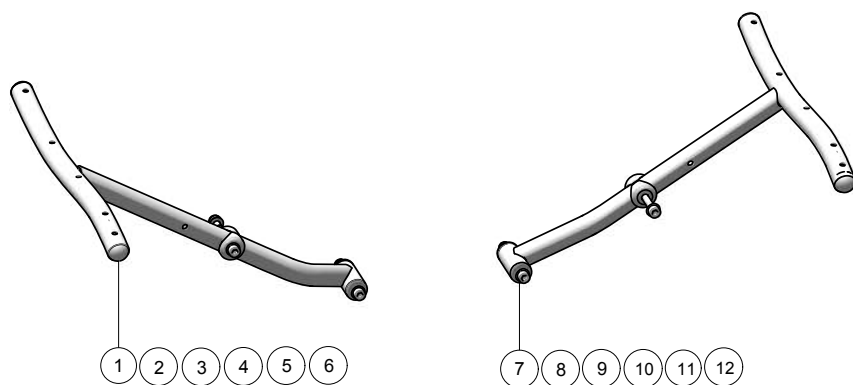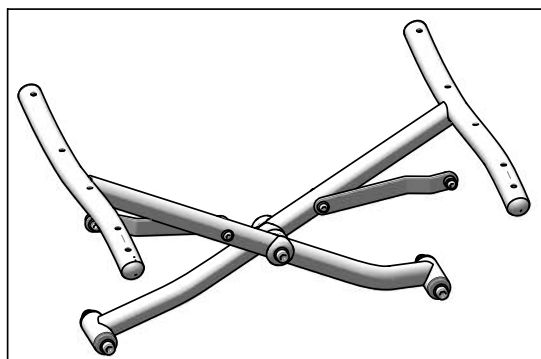


類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
	1	420300000258	KM9000 左座叉組 14*15" 平光黑	1			PC	
	2	420300000256	KM9000 左座叉組 14*16" 平光黑	1			PC	
	3	420300000254	KM9000 左座叉組 16*16" 平光黑	1			PC	
	4	420300000261	KM9000 左座叉組 16*18" 平光黑	1			PC	
	5	420300000263	KM9000 左座叉組 18*16" 平光黑	1			PC	
	6	420300000260	KM9000 左座叉組 18*18" 平光黑	1			PC	
	7	420300000257	KM9000 右座叉組 14*15" 平光黑	1			PC	
	8	420300000255	KM9000 右座叉組 14*16" 平光黑	1			PC	
	9	420300000253	KM9000 右座叉組 16*16" 平光黑	1			PC	
	10	420300000264	KM9000 右座叉組 16*18" 平光黑	1			PC	
	11	420300000262	KM9000 右座叉組 18*16" 平光黑	1			PC	
	12	420300000259	KM9000 右座叉組 18*18" 平光黑	1			PC	
	13	421200000034	KM9000 連桿組 14"	1			PC	

座叉

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
	14	421200000033	KM9000 連桿組 16"	1			PC	
	15	421200000032	KM9000 連桿組 18"	1			PC	
	16	110304010002	圓管塞 $\Phi 25.4 \times \Phi 23.4$	1			PC	

側架

側架

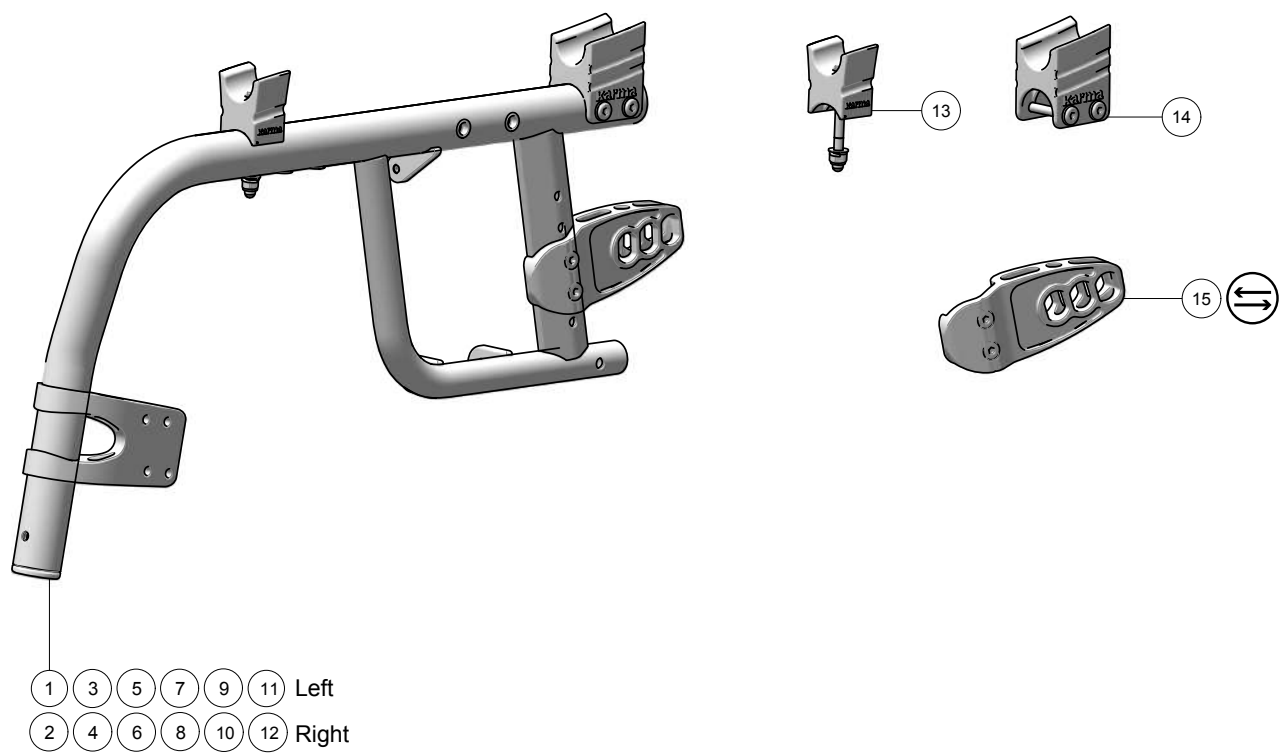


類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
	1	420200000358	KM9000 左側架組 Q24 *15-16" 白	1			PC	
	2	420200000357	KM9000 右側架組 Q24 *15-16" 白	1			PC	
	3	420200000356	KM9000 左側架組 Q24 *15-16" 檸檬黃	1			PC	
	4	420200000355	KM9000 右側架組 Q24 *15-16" 檸檬黃	1			PC	
	5	420200000354	KM9000 左側架組 Q24 *15-16" 黑鑽銀	1			PC	
	6	420200000353	KM9000 右側架組 Q24 *15-16" 黑鑽銀	1			PC	
	7	420200000359	KM9000 左側架組 Q24 *18" 白	1			PC	
	8	420200000364	KM9000 右側架組 Q24 *18" 白	1			PC	
	9	420200000363	KM9000 左側架組 Q24 *18" 檸檬黃	1			PC	
	10	420200000362	KM9000 右側架組 Q24 *18" 檸檬黃	1			PC	
	11	420200000361	KM9000 左側架組 Q24 *18" 黑鑽銀	1			PC	

側架

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
	12	420200000360	KM9000 右側架組 Q24 *18" 黑鑽銀	1			PC	
	13	155102030006	KM9000 S型基座組	1			PC	
	14	155102030005	KM9000 後S型基座組	1			PC	
	15	155102030010	KM9000 右調軸板組	1			PC	

推手管

推手管

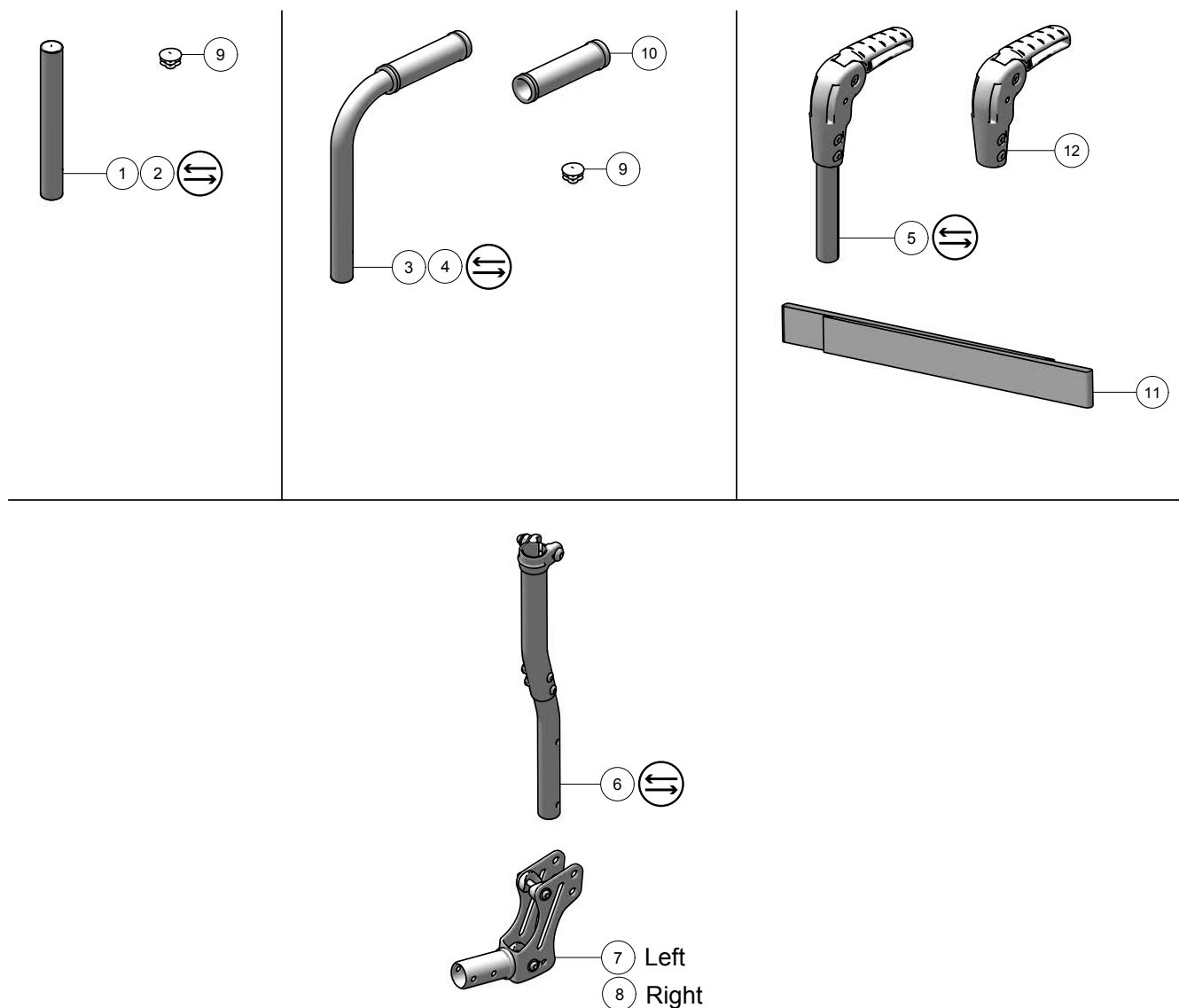

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
	1	150201030052	KM9000 背墊管組成 背高330-355	1			PC	
	2	150201030053	KM9000 背墊管組成 背高457-432	1			PC	
	3	150201030054	KM9000 背墊推手管組成 黑 背高330-406	1			PC	
	4	150201030055	KM9000 背墊推手管組成 黑 背高406-483	1			PC	
	5	155106030000	KM9000 折疊式推手握把組 黑 背高381-457.2	1			PC	
	6	420200000367	KM9000 背墊管組 黑	1			PC	
	7	420200000366	KM9000 左背墊管座組 黑	1			PC	
	8	420200000365	KM9000 右背墊管座組 黑	1			PC	
	9	110304010019	圓管塞 $\Phi 22.1 \times \Phi 17.8$	1			PC	
	10	110314010006	圓形推手握把套 7/8"*110L KRATON	1			PC	


推手管

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
	11	156304010000	KM9000 推手調整帶 18" 黑	1			PC	
	12	155100001233	EFL 介護型推手組 銀黑	1			PC	



剎車

駐車剎

後輪角度0°

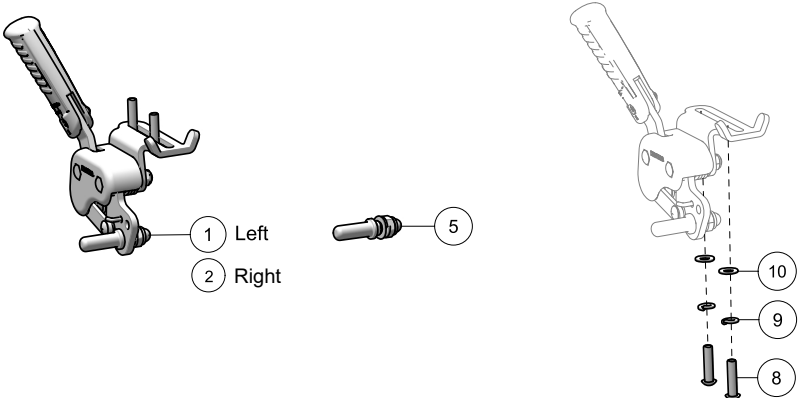

後輪角度3°

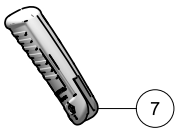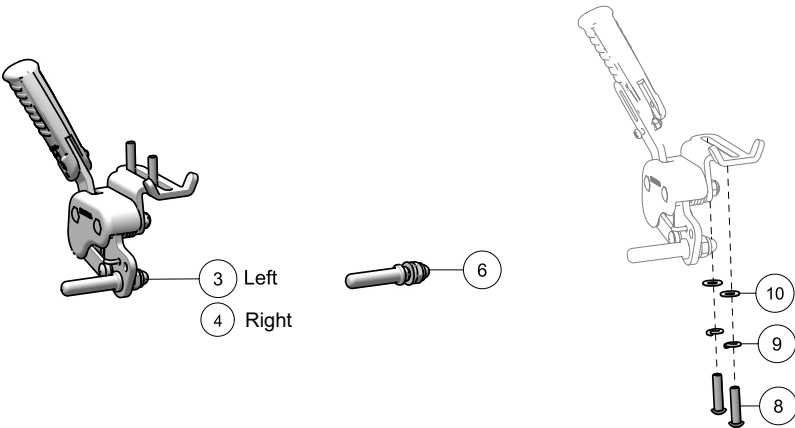


類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
★	1	150703020000	左駐車剎車組成 Q24	1			PC	
★	2	150703020001	右駐車剎車組成 Q24	1			PC	
★	3	150703020002	左駐車剎車組成 Q24	1			PC	
★	4	150703020003	右駐車剎車組成 Q24	1			PC	
	5	155710000008	KM9000 剎車組 Q24	1			PC	
	6	421700000004	FLX 剎車花輪粒組	1			PC	
	7	421700000003	FLX 駐車剎把手組	1			PC	
	8	110801040007	內六角扁圓頭螺絲 全牙 M6*P1*25L	1			PC	
	9	110802040000	彈簧墊片 公制 M6*D11.5*d6.1*1.5t	1			PC	
	10	110802040001	平墊片 公制 M6*D13*d6.3*0.8t	1			PC	


後輪

後輪 Q24x1"


後輪

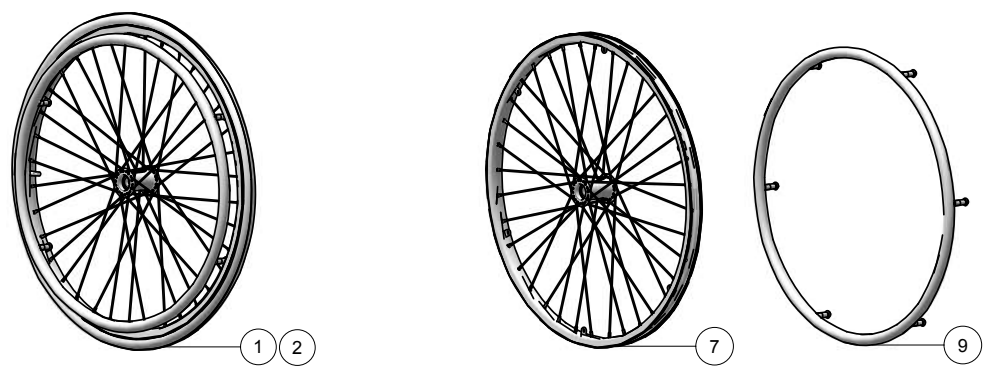

輕快輪

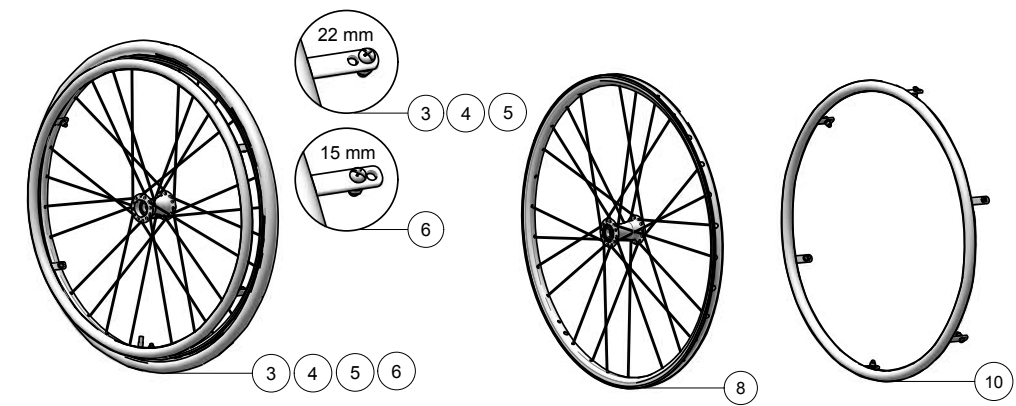

	外胎	內胎	襯帶
後輪	11 12	14	15
輕快輪	11 12 13	14	16

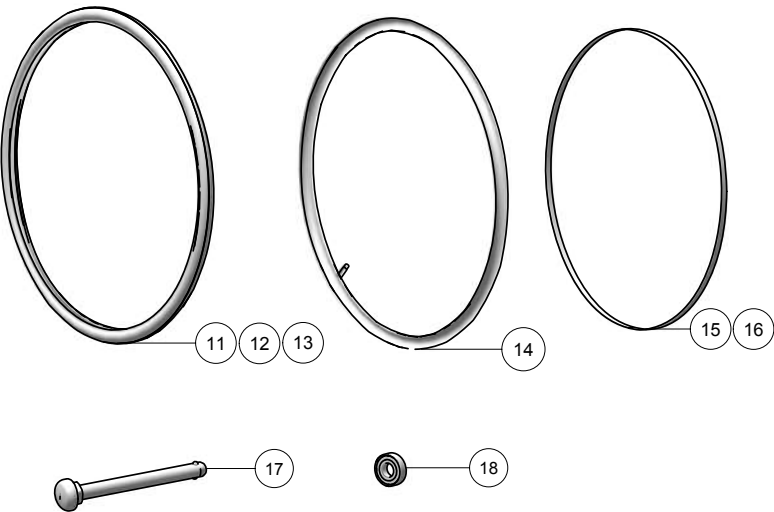


後輪

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
★	1	150600000096	手動後輪組成 24x1" 黃氣胎 鋁框 Q 鋁圓管形扶圈	1			PC	
★	2	150600000035	手動後輪組成 24x1" 灰氣胎 鋁框 Q 鋁圓管形扶圈	1			PC	
★	3	150600000226	手動後輪組成 24x1" 灰氣胎 鋁框 Q 鋁圓管形扶圈	1			PC	
★	4	150600000090	手動後輪組成 24x1" 黃氣胎 鋁框 Q 鋁圓管形扶圈	1			PC	
★	5	150600000046	手動後輪組成 24x1" 黑氣胎 鋁框 Q 鋁圓管形扶圈	1			PC	
★	6	150600000041	手動後輪組成 24x1" 黃氣胎 鋁框 Q 鋁圓管形扶圈	1			PC	
	7	420400000227	後插片式鋁輪圈組 原色 24x1 3/8"	1			PC	
	8	156003220010	輪圈調整 24"x1 Q 24H	1			PC	
★	9	156006010001	拉帽式鋁手扶圈組 24" 6孔	1			PC	
★	10	420400000085	焊耳式鋁手扶圈組 24" 6孔 24.6, 33	1			PC	
★	11	110305020018	外胎 24"*1 K191 黃	1			PC	
★	12	110305020014	外胎 24"x1" C1051 灰	1			PC	
	13	110305020016	外胎 24"x1" K191-03019H90 黑	1			PC	
★	14	110305010017	內胎 24"x1" 美嘴 A/V	1			PC	
★	15	110305060007	襯帶 24"*1 3/8"	1			PC	
★	16	110305060004	襯帶 24"*16mm	1			PC	
★	17	110206010017	香菇頭快取軸心 Φ12.7*147.5L	1			PC	
★	18	110201000022	滾珠軸承 7R8ZZΦ28.57*Φ12.7*7.94t	1			PC	


後輪

輪座/軸襯

後輪角度0°

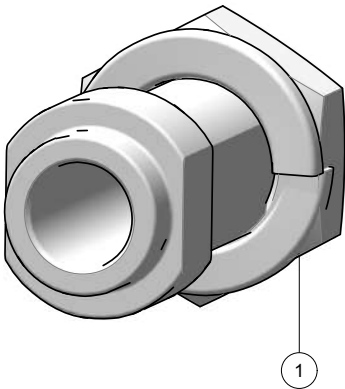









後輪角度3°

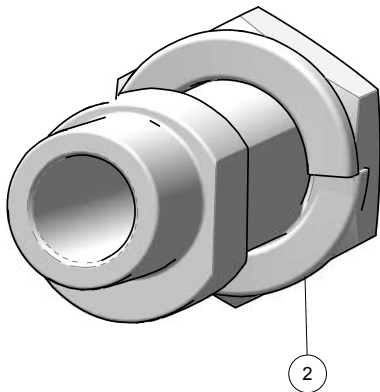

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
	1	156005010000	KM9000 快取軸襯組成 65L	1			PC	
	2	156005010001	KM9000 快取軸襯組成 65L	1			PC	

前輪

前輪

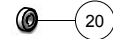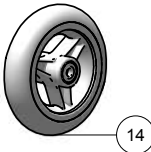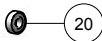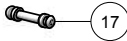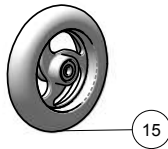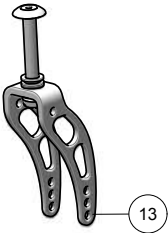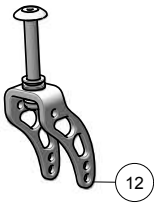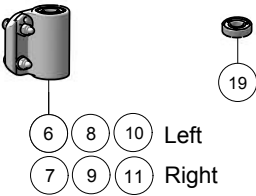


尺寸	輪框	座高	組成	前輪叉	輪胎	螺絲包
5"	鋁	17.5"(445 mm)	①	⑫	⑮	⑰
		18"(457 mm)				
		18.5"(470 mm)	②	⑬		
		19"(483 mm)				
		19.5"(495 mm)				
	塑膠	17.5"(445 mm)	③	⑫	⑭	⑱
		18"(457 mm)				
		18.5"(470 mm)	④	⑬		
		19"(483 mm)				
		19.5"(495 mm)				
6"	塑膠	19"(483 mm)	⑤	⑬	⑯	⑲
		19.5"(495 mm)				
		20"(510 mm)				

前輪

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
★	1	150505020000	硬胎前輪組成 5" 黑橡膠	1			PC	
★	2	150505020001	硬胎前輪組成 5" 黑橡膠	1			PC	
★	3	150501020002	硬胎前輪組成 5" 灰PU	1			PC	
★	4	150501020003	硬胎前輪組成 5" 灰PU	1			PC	
★	5	150501020005	硬胎前輪組成 6" 灰PU	1			PC	
	6	156004010002	KM9000 前/左輪座培林組 白	1			PC	
	7	156004010003	KM9000 前/右輪座培林組 白	1			PC	
	8	156004010006	KM9000 前/左輪座培林組 檸檬黃	1			PC	
	9	156004010007	KM9000 前/右輪座培林組 檸檬黃	1			PC	
	10	156004010004	KM9000 前/左輪座培林組 黑鑽銀	1			PC	
	11	156004010005	KM9000 前/右輪座培林組 黑鑽銀	1			PC	
	12	156001020014	前勁風叉螺帽組 52W*110H*94L	1			PC	
	13	156001020015	前勁風叉螺帽組 92W*153H*94L	1			PC	
★	14	420400000255	前輪組 5" 灰PU	1			PC	
★	15	156002130003	實心胎 含輪框 5" 黑	1			PC	
★	16	420400000258	前輪組 6" 灰PU	1			PC	
	17	420400000257	前輪鎖固螺絲包 50L	1			PC	
	18	420400000256	前輪鎖固螺絲包 50L	1			PC	
	19	110201000023	滾珠軸承 7R8ZZΦ28.57*Φ12.7*7.94t	1			PC	
	20	110201000009	滾珠軸承 608ZZΦ22*Φ8*7t	1			PC	

座背墊


座墊

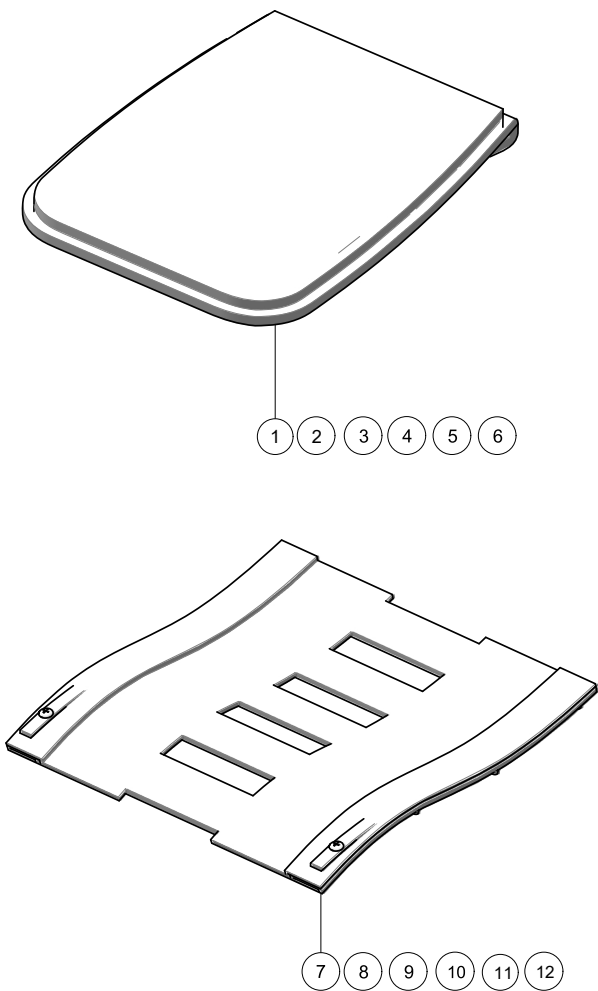

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
★	1	166402020001	KM-9000 座上墊 三明治黑網 14*15"	1			PC	
★	2	166402020002	KM-9000 座上墊 三明治黑網 14*16"	1			PC	
★	3	166402020003	KM-9000 座上墊 三明治黑網 16*16"	1			PC	
★	4	166402020004	KM-9000 座上墊 三明治黑網 16*18"	1			PC	
★	5	166402020005	KM-9000 座上墊 三明治黑網 18*16"	1			PC	
★	6	166402020006	KM-9000 座上墊 三明治黑網 18*18"	1			PC	
	7	156402020006	KM9000 張力調整式座墊組 素黑 14*15"	1			PC	
	8	156402020007	KM9000 張力調整式座墊組 素黑 14*16"	1			PC	
	9	156402020008	KM9000 張力調整式座墊組 素黑 16*16"	1			PC	
	10	156402020009	KM9000 張力調整式座墊組 素黑 16*18"	1			PC	
	11	156402020010	KM9000 張力調整式座墊組 素黑 18*16"	1			PC	
	12	156402020011	KM9000 張力調整式座墊組 素黑 18*18"	1			PC	

座背墊


背墊

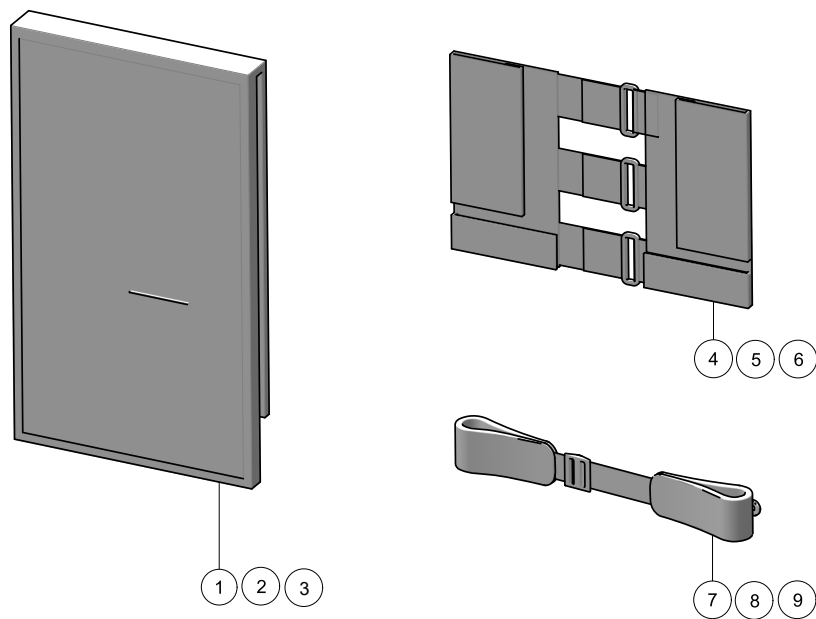

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
★	1	166302020002	KM9000背上墊 三明治黑網14"背高330-480 KARMA	1			PC	
★	2	166302020003	KM9000背上墊 三明治黑網16"背高330-480 KARMA	1			PC	
★	3	166302020004	KM9000背上墊 三明治黑網18"背高330-480 KARMA	1			PC	
	4	166303020003	KM9000 張力調整式 背底墊 素黑14"背高330-480	1			PC	
	5	166303020004	KM9000張力調整式背底墊 素黑16"背高330-480	1			PC	
	6	166303020005	KM9000張力調整式背底墊 素黑18"背高330-480	1			PC	
	7	156304020000	KM9000 背墊組 黑色真牛皮 14"	1			PC	
	8	156304020001	KM9000 背墊組 黑色真牛皮 16"	1			PC	
	9	156304020002	KM9000 背墊組 黑色真牛皮 18"	1			PC	

扶手







扶手

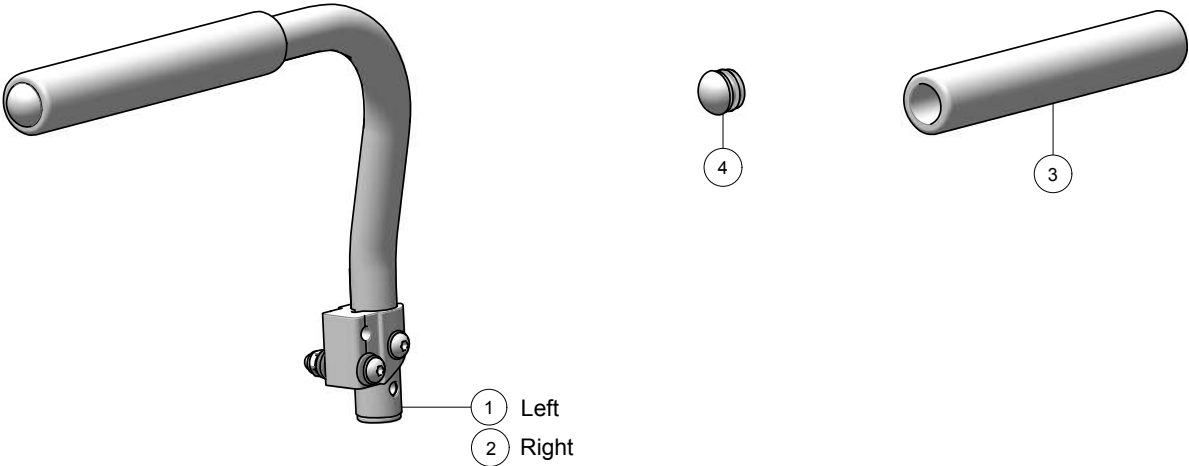

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
	1	151001000000	KM9000 左扶手組成 黑	1			PC	
	2	151001000001	KM9000 右扶手組成 黑	1			PC	
	3	110602030005	圓形泡棉 Φ23*6t*200mm	1			PC	
	4	110304010002	圓管塞 Φ25.4*Φ23.4	1			PC	

扶手


護板

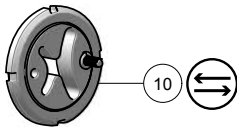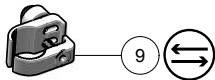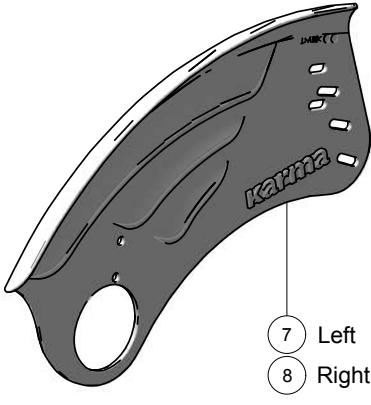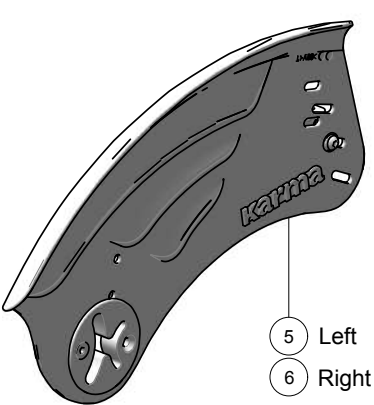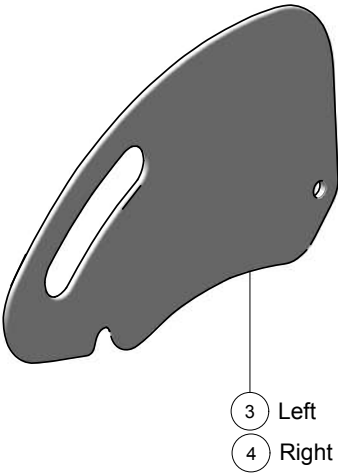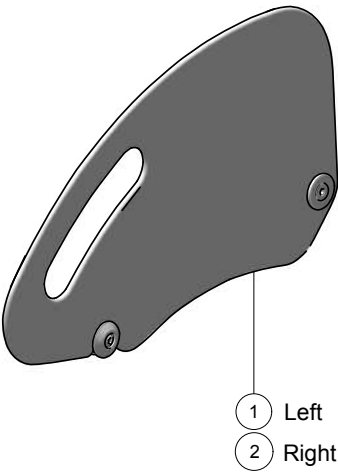

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
	1	151006000000	KM9000 左扶手護板組成 KARMA	1			PC	
	2	151006000001	KM9000 右扶手護板組成 KARMA	1			PC	
	3	420800000282	KM9000 左護板組 KARMA	1			PC	
	4	420800000281	KM9000 右護板組 KARMA	1			PC	
	5	151006000002	KM9000 左扶手護板組成 KARMA	1			PC	
	6	151006000003	KM9000 右扶手護板組成 KARMA	1			PC	
	7	420800000280	KM9000 左護板組 KARMA	1			PC	
	8	420800000279	KM9000 右護板組 KARMA	1			PC	
	9	422300000048	夾塊組	1			PC	
	10	420800000278	KM9000 護板角度調整組	1			PC	

踏板


連動式踏板

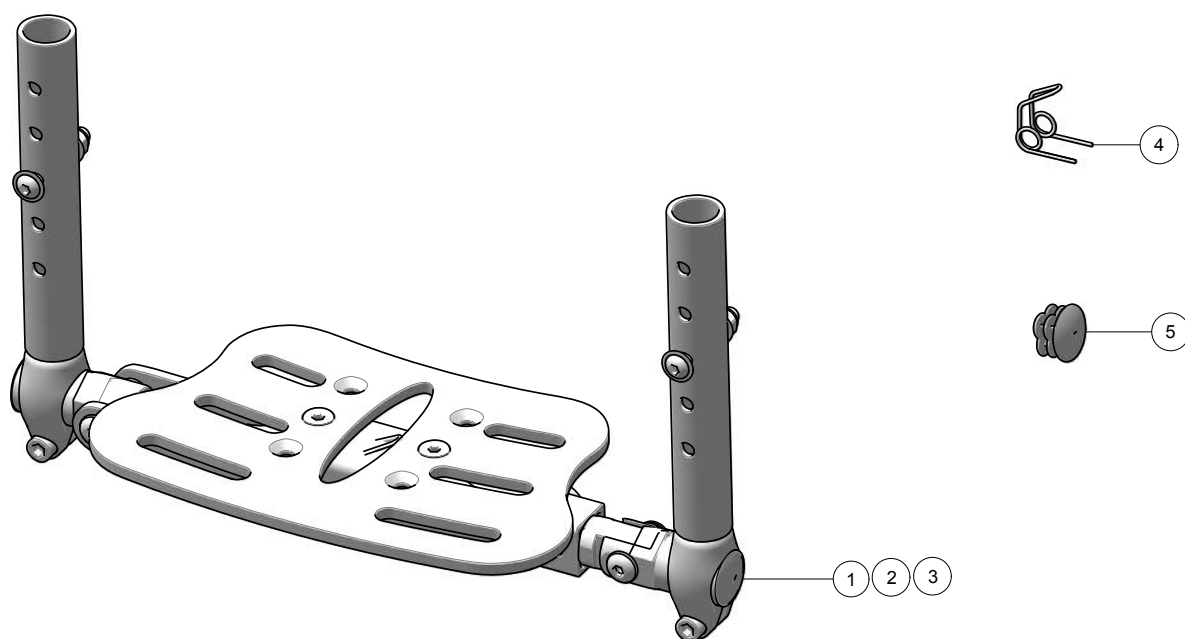

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
	1	152500100001	KM9000 連動式鋁踏板組成 14"	1			PC	
	2	152500100002	KM9000 連動式鋁踏板組成 16"	1			PC	
	3	152500100003	KM9000 連動式鋁踏板組成 18"	1			PC	
	4	110202000057	扭力彈簧 $\Phi 1.4$	1			PC	
	5	110304010019	圓管塞 $\Phi 22.1 \times \Phi 17.8$	1			PC	

踏板


一片式踏板

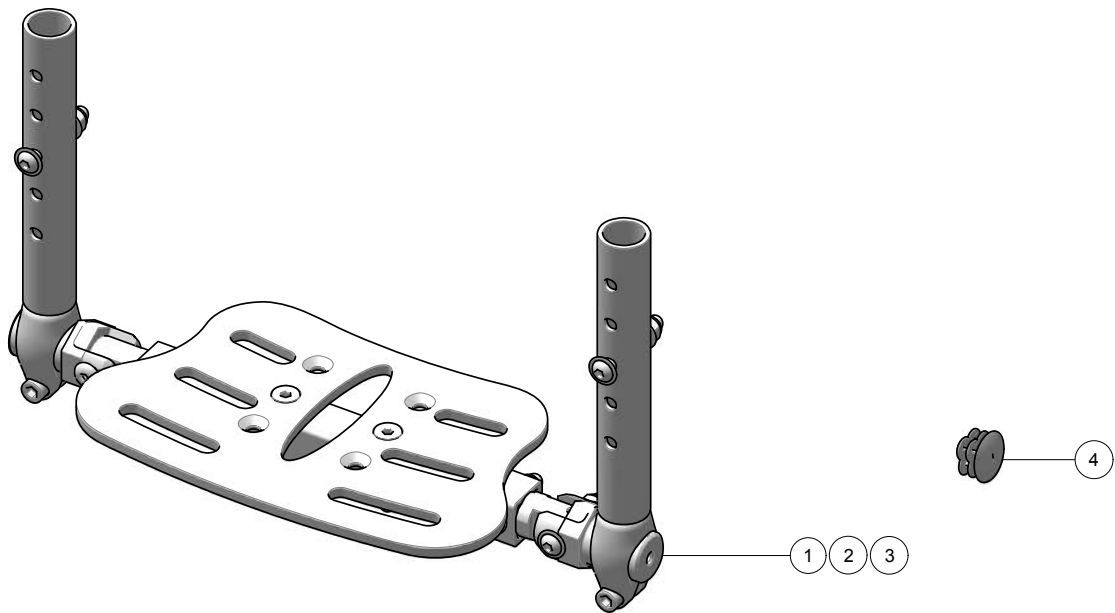

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
	1	152500100004	KM9000 一片可調式鋁踏板組成 14"	1			PC	
	2	152500100005	KM9000 一片可調式鋁踏板組成 16"	1			PC	
	3	152500100006	KM9000 一片可調式鋁踏板組成 18"	1			PC	
	4	110304010019	圓管塞 $\Phi 22.1 \times \Phi 17.8$	1			PC	

踏板


標準型踏板

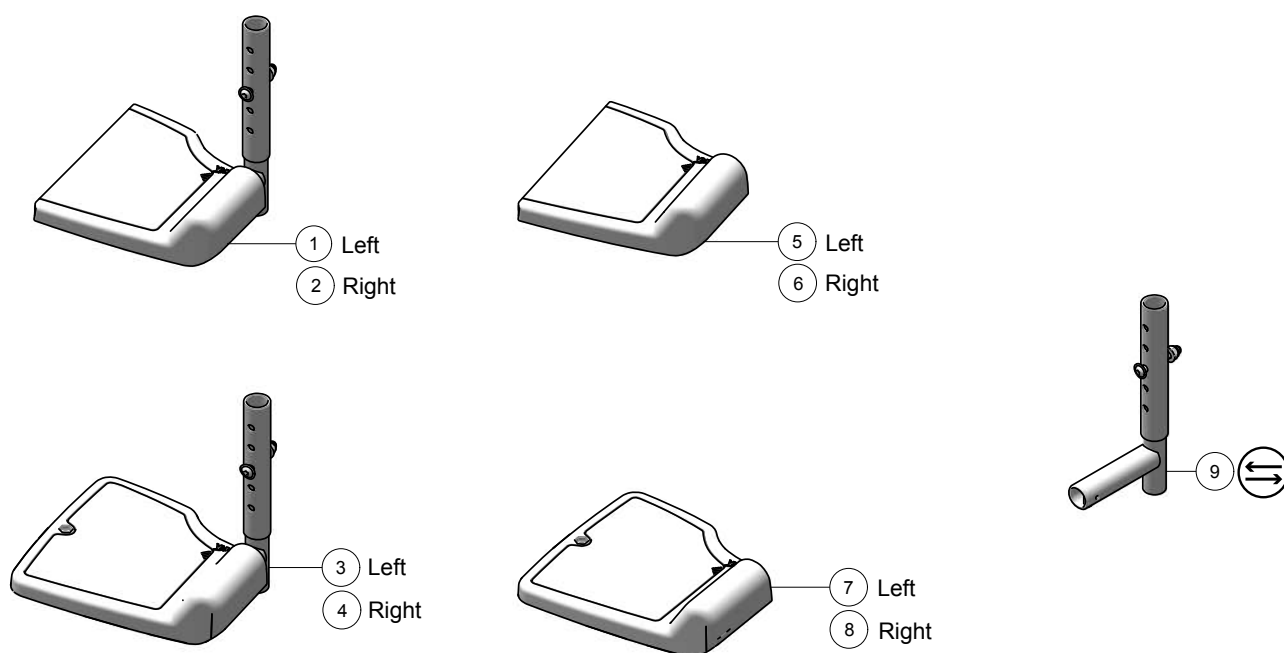

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
	1	150800000200	KM9000 左標準型踏板組成 16"	1			PC	
	2	150800000201	KM9000 右標準型踏板組成 16"	1			PC	
	3	150800000198	KM9000 左標準型踏板組成 18"	1			PC	
	4	150800000199	KM9000 右標準型踏板組成 18"	1			PC	
★	5	155800000296	MGN 左標準型踏板組 12-14"	1			PC	
★	6	155800000297	MGN 右標準型踏板組 12-14"	1			PC	
★	7	155800000060	KM1500.3 左標準式踏板組 16"	1			PC	
★	8	155800000061	KM1500.3 右標準式踏板組 16"	1			PC	
	9	155800000397	KM9000 標準式踏板L桿組 Φ22.1*84L 16-18"	1			PC	

外加配件


骨盆帶

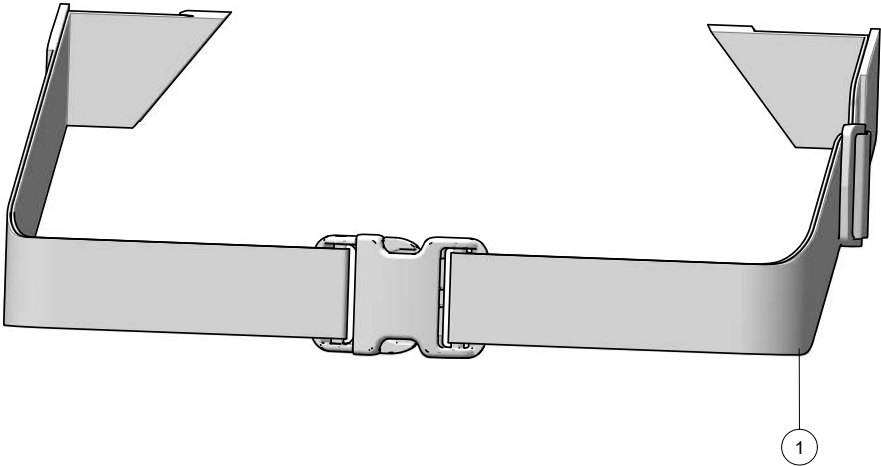

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
★	1	156606010000	KM-2500 骨盆帶組成 900L	1			PC	

外加配件


腿帶

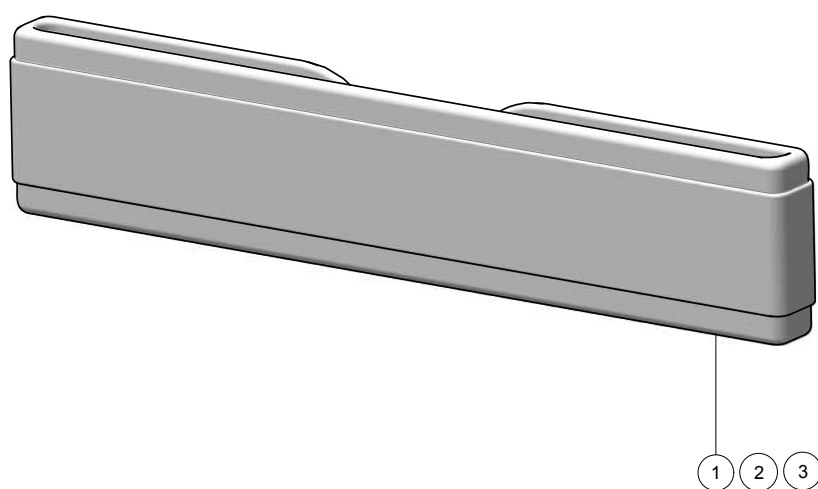

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
	1	151103010000	KM9000 腿帶組成 三明治黑網 14"	1			PC	
	2	151103010001	KM9000 腿帶組成 三明治黑網 16"	1			PC	
	3	151103010002	KM9000 腿帶組成 三明治黑網 18"	1			PC	

外加配件


反撐桿

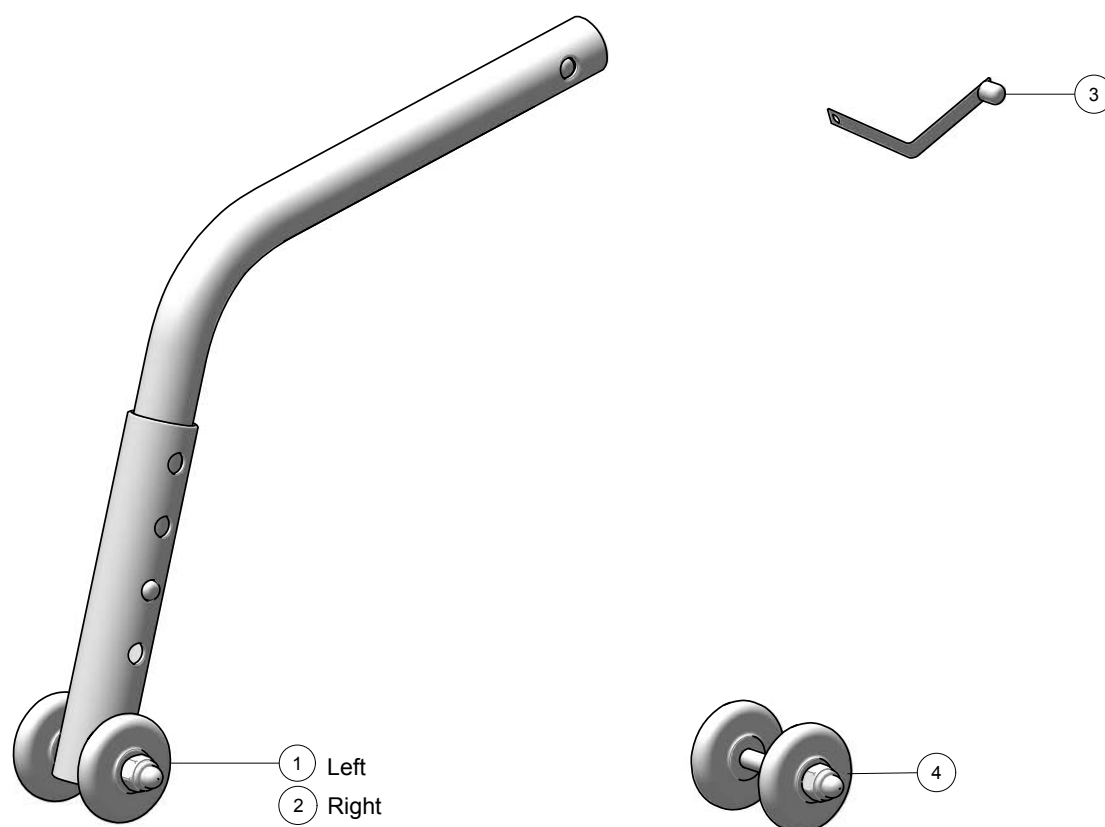

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
	1	151201000006	KM9000 左反撐桿組成 272.4L	1			PC	
	2	420900000040	KM9000 右反撐桿組成	1			PC	
	3	110202000074	彈扣 $\Phi 6.35 \times 5.3W \times 0.5t$	1			PC	
	4	420900000020	FLX-J00 反撐輪組	1			PC	

外加配件


拐杖盒

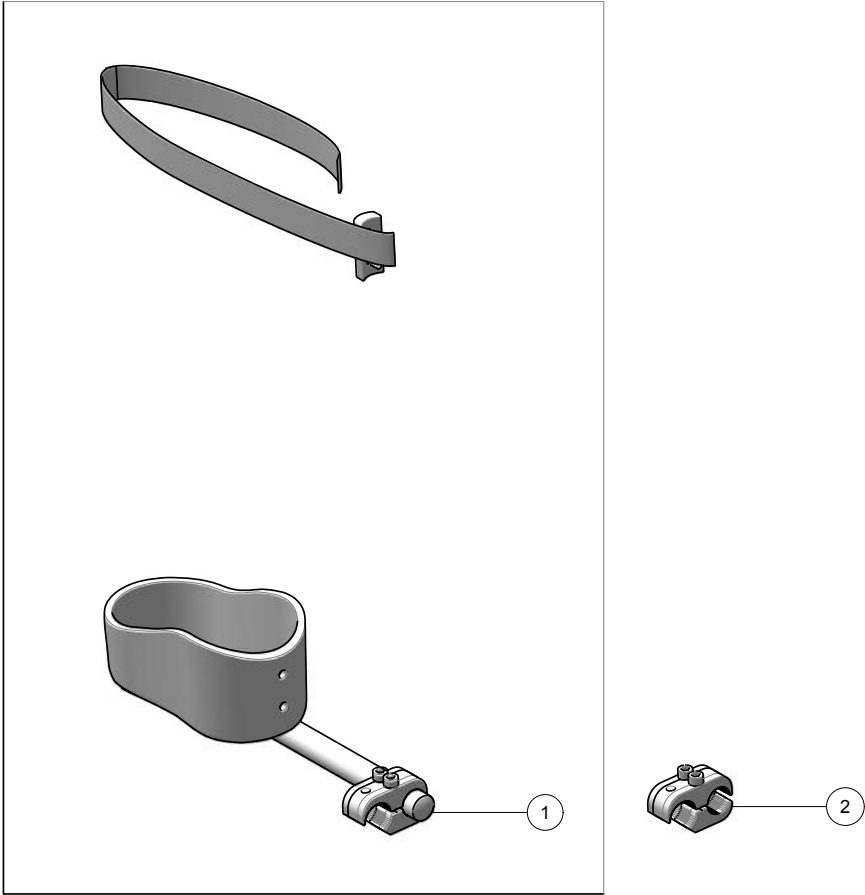

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
	1	151209000000	KM9000 拐杖盒組成	1			PC	
	2	422300000033	夾塊組7分夾6分	1			PC	

外加配件

打氣筒

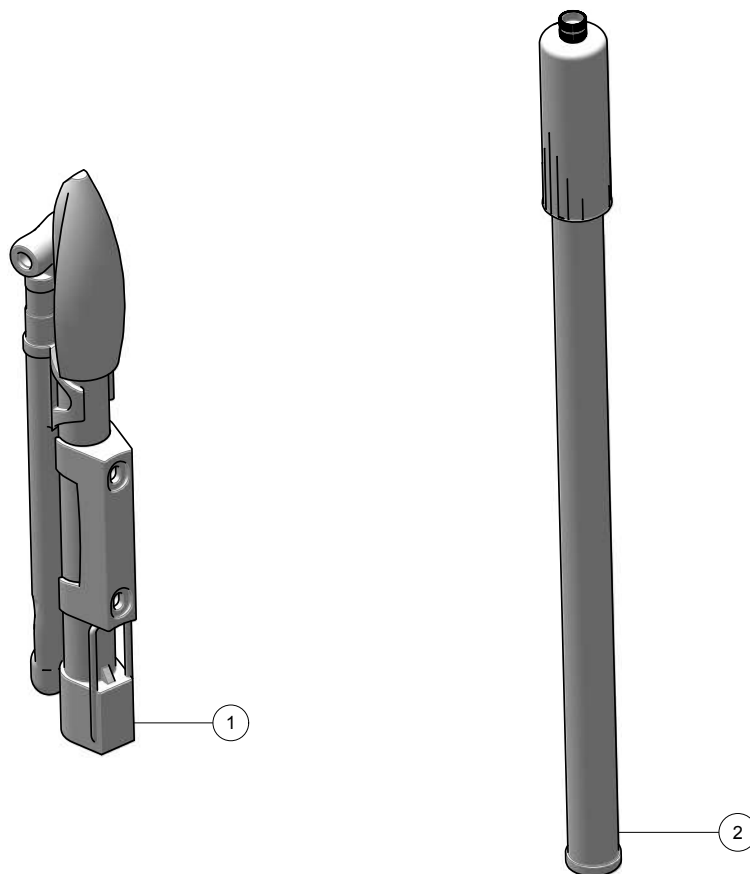

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
	1	800000000301	打氣筒 美嘴	1			PC	
	2	110399010002	打氣筒 美式	1			PC	

紙箱/使用手冊

紙箱/使用手冊

座深	15"/16"	18"
	①	②

類型	圖號	物料編號	物料名稱	數量	紀錄	備註	單位	單價
	1	110401000023	KM-9000成品紙箱外箱KARMA 英文 Q24	1			PC	
	2	110401000024	KM-9000成品紙箱外箱KARMA 英文 Q24	1			PC	
	3	110404000065	KM-9000 使用手冊 繁中 A5	1			PC	
	4	110404000066	KM-9000 使用手冊 英文 A5	1			PC	
	5	110400000944	KM9000 使用手冊 西班牙文 A5	1			PC	

karma 康揚

好的輪椅，好在適配！



康揚股份有限公司
KARMA MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.
嘉義縣民雄鄉大學路二段2363號
免付費服務電話：0800-522 166 傳真：05-206 6699
電話：05-2066688 分機213~219
服務時間：週一至週五 08:30-17:30
www.karma.com.tw

Rev.S001 Nov.2023